


Manual de instrucciones

Muchas gracias por su compra del soporte de pie para dispensadores TS-1390. Se recomienda que lea detenidamente este manual para instrucciones antes de su uso. Mantenga este manual a mano para futuras referencias. Si tiene cualquier duda acerca de la unidad, consulte con su representante de ventas por favor.

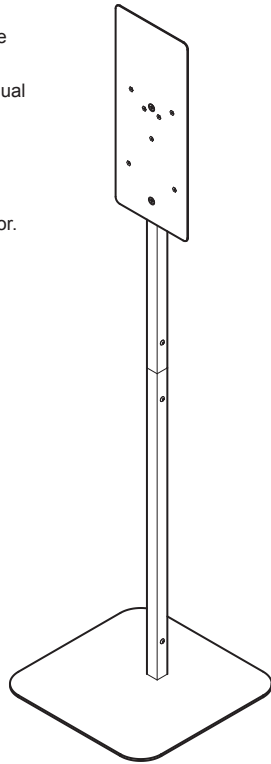

Partes y Accesorios

- Panel 1
- Tubo de soporte vertical 1
- Plataforma de pie 1
- Tornillos 10
- Etiqueta 1
- Manual de instrucciones 1

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente estas precauciones de seguridad antes de usar la unidad. Las precauciones indicadas en este manual describen información de seguridad importante, y se le aconseja que las respete. Después de su lectura, mantenga este manual disponible para futuras referencias.

■El grado de daño causado por uso indebido es clasificado por los siguientes símbolos.

	Advertencia	Manejo inadecuado puede resultar en lesiones graves o muerte.
	Precaución	Manejo inadecuado puede resultar en lesiones y/o daños a la propiedad.
	Nunca intente esto	Ej.:
	Asegúrese de seguir las instrucciones	Ej.:

Precauciones de instalación	
	Advertencia
	No utilice la unidad excepto para su propósito designado. Uso de la unidad fuera de su uso especificado puede causar lesiones o mal funcionamiento.
	Coloque la unidad de forma segura en una superficie fuerte y nivelada. La unidad puede sufrir daños y provocar lesiones por caídas o vuelcos.
	No instale la unidad cerca de llamas abiertas o de cualquier cosa que genere chispas. Puede causar daños o incendios. Mantenga un extintor de incendios cercano.

Precauciones de instalación	
	Precaución
	No instale la unidad en un lugar directamente expuesto a la luz del sol o con temperaturas elevadas. Puede causar el malfuncionamiento de la unidad.

Especificaciones

Artículo	Detalles	
Nombre	Soporte de pie para dispensador	
Modelo	TS-1390	
Dimensiones	W350 × D350 × H1390mm	
Peso	Approx. 6kg (empaquetado no incluido)	
Materiales	Panel	Acero pintado
	Tubo de soporte vertical	Acero pintado
	Plataforma de pie	Acero pintado
Dispensadores	Indicados por Saraya Co., Ltd.	

※Especificaciones presentes en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.



Obten más información aquí.

Contacto para preguntas 2-2-8 Yuzato, Higashiumiyoshi-ku, Osaka 546-0013 Japan
Saraya Co., Ltd. TEL.+81-6-6703-6556 URL: <http://www.saraya.com/>
 Horario: Lunes a viernes (excepto festivos) 09:00~18:00

•Para obtener más información sobre este producto o su mantenimiento, contáctenos por teléfono.



2020107-00/JT

Precauciones de seguridad



Precauciones de uso	
	Advertencia
	No vierta agua sobre la unidad. Puede causar un incendio o mal funcionamiento.
	Nunca instale este producto cerca de fuentes de llamas abiertas como velas, incienso, velas para insectos o cigarrillos. Puede causar la deformación de la unidad.
	Utilice únicamente dispensadores no-touch aprobados por Saraya. Otros dispensadores pueden causar daños o lesiones por caída.
	No coloque ni cuelgue objetos sobre la unidad. La unidad puede causar daños o lesiones por caída.
	No deje caer la unidad ni la someta a fuertes impactos. Puede provocar incendio o mal funcionamiento.
	Realice un mantenimiento regular. Para mantener la calidad y seguridad de la unidad, realice inspecciones y limpiezas regulares.
	No utilice diluyentes, bencina, petróleo, jabón en polvo, polvo para pulir, detergentes no neutros, agua hirviendo, ácidos, materiales alcalinos y cepillos. Pueden causar arañazos en la superficie, óxido y decoloración.

Precauciones de reubicación y reparación	
	Advertencia
	No desmonte, repare o modifique la unidad. La unidad puede averiarse. Si tiene alguna pregunta sobre la unidad, consulte con su representante de ventas.

Precauciones de eliminación	
	Precaución
	Obedezca las leyes y reglamentos de su país y zona al deshacerse de la unidad.

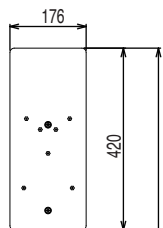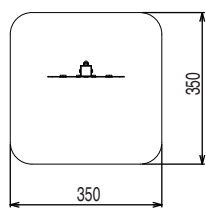


1390

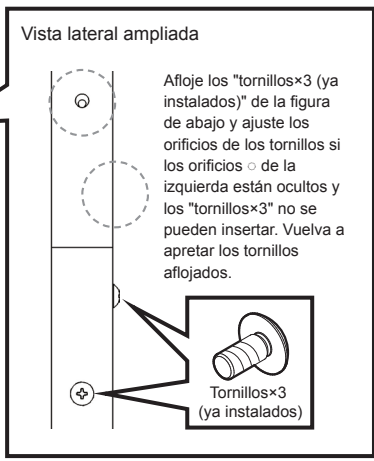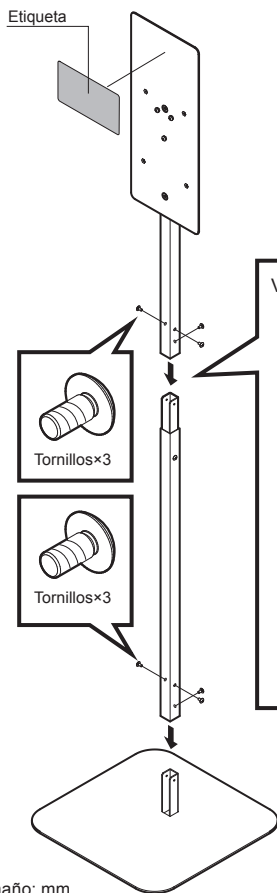

Ensamblaje adicional

Asegúrese de apretar los tornillos de cabeza plana y las tuercas de sombrerete si están sueltas.


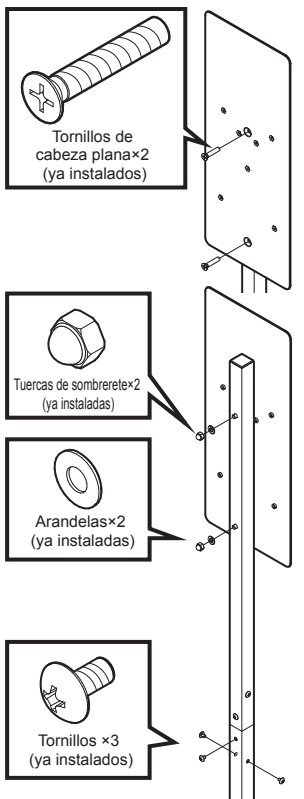


Instalación


Al instalar el UD-1600, UD-9000, UD-450, ADS500/1000 y TUD-1000

El uso de las bandejas opcionales es recomendado. Consulte el manual de instrucciones adjunto a cada dispensador para obtener detalles sobre su método de instalación.


UD-1600
UD-9000
UD-450
ADS-500/1000
TUD-1000

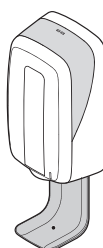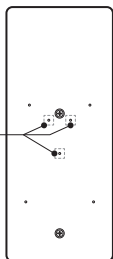


UD-1600
Bandeja D

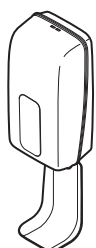


UD-9000
Bandeja B

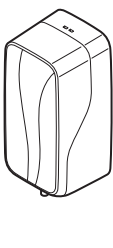


UD-450

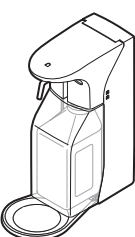

ADS-500/1000
Bandeja

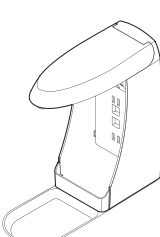


TUD-1000
Bandeja E

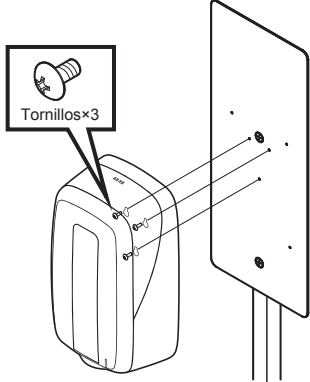

Al instalar Versaclenz

El uso de las bandejas opcionales es recomendado. Consulte el manual de instrucciones adjunto a cada dispensador para obtener detalles sobre su método de instalación.

Versaclenz

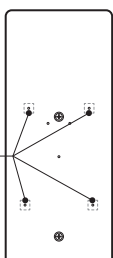

Mantenimiento

Realice un mantenimiento regular.

Si se deja el desinfectante o agua en la unidad durante mucho tiempo, puede causar oxidación o decoloración.

Cualquier área sucia debe ser limpiada con un paño suave y seco.

Las manchas difíciles deben ser limpiadas con detergente y agua neutra, limpiadas con una toalla húmeda y secadas posteriormente.